

レガシー PM レポート Optima CT660 & CT Revo EVO スケジュール

お客様情報

お客様名

山口大学医学部附属病院 御中

サービス記録#:

16489283

システム番号/シリアル番号

OH0127

システムタイプ:

Optima CT660

お客様機器名称:

NA

ソフトウェアバージョン:

15HW25.2_SP2-0-1

点検周期:

4か月毎

開始日

2025-12-24

国

JAPAN-JA

モダリティ

CT

準備項目 - 前回点検の確認:

前回のスケジュールの完了

スケジュール A

前回点検日:

2025-03-19

事前に完了している項目を記載

NA

点検スケジュール システム A

点検スケジュール システム B

点検開始時の項目

温湿度の確認

項目	仕様	測定値	結果	コメント
撮影室の温度 (合格/不合格/非該当から選択)	18~26 °C / 64~79 °F	23.7	合格	
撮影室の湿度 (合格/不合格/非該当から選択)	30~60 %	47	合格	

ガントリーの点検

項目	結果	コメント
ガントリーディスプレイライトの確認 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	
緊急停止ボタンテスト (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	
患者チルトセンサーの確認 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	

レーザーアライメントライトの確認

項目	結果	コメント
内部アライメントライトの確認 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 v	
外部アキシャルと内部アキシャルの距離 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 v	

システムオプションの点検

項目	結果	コメント
天井設置機器のボルト点検 (合格/不合格/非該当から選択)	非該当 v	設置がない為非該当
カーディアックオプションの点検 (合格/不合格/非該当から選択)	非該当 v	該当オプションない為非該当
根本インジェクターの点検 (合格/不合格/非該当から選択)	非該当 v	メンテナンス対象外
RCK-AVIMOS を点検 (合格/不合格/非該当から選択)	非該当 v	該当オプションない為非該当

コリメータの点検

項目	結果	コメント
アパーチャとフィルターの位置と動作 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	

保護ウィンドウと開口部の確認と清掃
(合格/不合格/非該当から選択)

合格



NanoCloud AWS 点検

項目	結果	コメント
デジタル証明書の更新 (合格/不合格/非該当から選択)	非該当	該当オプションない為非該当

ファントムの点検

項目	結果	コメント
QAファントムの点検 (合格/不合格/非該当から選択)	合格	

ガントリー電源オフ（カバー取り外し）

通常点検

項目	結果	コメント
ガントリーチルトゼロの確認 (合格/不合格/非該当から選択)	合格	-0.003

項目	結果	コメント
緊急電源遮断スイッチ（壁付） (合格/不合格/非該当から選択)	非該当	該当オプションない為非該当
UPS パワーオフの動作確認 (合格/不合格/非該当から選択)	非該当	該当オプションない為非該当

コンソールの清掃と点検

項目	結果	コメント
コンポーネントフィルター、ファン、グリルの清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格	
ファンの目視点検 (合格/不合格/非該当から選択)	合格	

耐震アンカーの確認（必要な場合）
(合格/不合格/非該当から選択)

非該当



アンカー固定ない為非該当

スリップリングとブラシブロックの確認と点検

項目	結果	コメント
スリップリングの清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格	▼
スリップリングトラックの点検 (完了/未完了/非該当から選択)	合格	▼
ブラシブロックの清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格	▼
ブラシチップの確認 (合格/不合格/非該当から選択)	合格	▼

ガントリーベルトテンションの調整と確認

項目	検査結果	コメント
ベルト張力の確認と調整 (完了/未完了/非該当から選択)	合格	▼

ガントリーフィルターの清掃

項目	結果	コメント
DASディテクタープレナムフィルターの清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格	▼
ディテクターフェースプレートの清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格	▼
ガントリーヒーターフィルターの清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格	▼
トップカバーファンの清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格	▼
ガントリー回転で干渉無きことを確認 (合格/不合格/非該当から選択)	合格	▼

高電圧ケーブルのキャンドルスティック点検

項目	検査結果	コメント
高電圧ケーブルキャンドルスティックの点検 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	スケジュールAで実施済

油圧チルトポンプ（オイル漏れ点検）

項目	結果	コメント
油圧チルトシリンダーおよび継手の確認 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	
油圧チルトポンプとリザーバの確認 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	

NGPDU

項目	結果	コメント
カバーとPDU内部の清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 v	
電子部品の確認 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	
全コネクタのトルク確認 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 v	
耐震アンカーボルトの点検 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	

エンコーダ

項目	結果	コメント
回転式エンコーダホイールの点検 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 v	

項目	前回の交換日	結果	コメント
エンコーダの交換	2019-01-10	交換の必要なし v	

ガントリー電源オン（カバー取り外し）

通常点検

項目	結果	コメント
UPSの電源が入り操作可能であること (合格/不合格/非該当から選択)	非該当 <input type="checkbox"/>	該当オプションない為非該当
プレナムファン (5) の動作確認 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 <input type="checkbox"/>	
プレナムファン (3) の動作確認 Merc40 (合格/不合格/非該当から選択)	非該当 <input type="checkbox"/>	プレナムファン (5) のため非該当

項目	仕様：	直近のグリース塗布日：	前回注油からの回転数	グリース塗布結果	結果	コメント
ガントリーメインベアリングの注油	2M 回転以上または 1 年以上の場合 はグリースを塗布	2025-12-24	0	GreaseNot Required	完了 <input type="checkbox"/>	今回:10,576,716

X線管ヒートエクスチェンジャーとポンプの点検

項目	結果	コメント
X線管ヒートエクスチェンジャーの点検と清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 <input type="checkbox"/>	
JEDIインバータファンの点検と清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 <input type="checkbox"/>	

ガントリー電源オン（カバー取り外し）

通常点検

項目	結果	コメント
スキャンウィンドウの確認/交換 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 <input type="checkbox"/>	
回転時の隙間確認 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 <input type="checkbox"/>	

完了処理

システムスキャンテスト

項目	QA ファントムシリアル番号	ロケーション	ガントリー シリアル番号
	<input type="text" value="1006144"/>	<input type="text" value="サービス棚上"/>	<input type="text" value="48334YC7"/>

スキャン	スキャンエラーの有無	アーチファクト	コメント
シリーズ1 (スカウト/オートボイス) (合格/不合格/非該当から選択)	<input type="text" value="合格"/> ▼	<input type="text" value="いいえ"/> ▼	<input type="text"/>
シリーズ2 (アキシャル/チルト) (合格/不合格/非該当から選択)	<input type="text" value="合格"/> ▼	<input type="text" value="いいえ"/> ▼	<input type="text"/>
シリーズ3 (ヘリカル/オートボイス) (合格/不合格/非該当から選択)	<input type="text" value="合格"/> ▼	<input type="text" value="いいえ"/> ▼	<input type="text"/>

項目	結果	コメント
X線照射表示ランプ (合格/不合格/非該当から選択)	<input type="text" value="合格"/> ▼	<input type="text"/>
スキャンコントロールボタンのテスト (合格/不合格/非該当から選択)	<input type="text" value="合格"/> ▼	<input type="text"/>

完了処理

項目	結果	コメント
点検記録の更新と保管 (完了/未完了/非該当から選択)	<input type="text" value="合格"/> ▼	<input type="text"/>
点検記録の文書作成 (完了/未完了/非該当から選択)	<input type="text" value="合格"/> ▼	<input type="text"/>
お客様記録の作成 (完了/未完了/非該当から選択)	<input type="text" value="合格"/> ▼	<input type="text"/>

点検スケジュール システム C

点検スケジュール システム W

オプションHHSスキャンデータ

追加作業の有無

継続作業の必要なし



作業予定日:

2025-12-24

この点検は、GE
Healthcare の点検規格の
すべてに合格しました。



コメント・ツール・添付ファイル

コメント 文字 2000

使用ツール

ツール詳細

電子記録に記載

シリアル番号

バーコード

校正期限日

添付ファイル

ファイル選択 選択されていません

Attached Documents :

GE HealthCare担当者

作業者数

1



名前:

渡部太郎

SSO # :

501303137

サービス記録#

16489283

完了日

2025-12-24

お客様署名

Yes Not Required