

保守点検計画実施記録書

山口大学医学附属病院 放射線部

放射線部医療機器
安全管理責任者



作成年月日 平成 31 年 4 月 2 日

保管場所	A1 スタッフステーション廊下				
保守点検実施状況	施設実施				
医療機器名	移動型エックス線装置				
製造販売業者	(株)島津製作所				
修理点検連絡先	(株)島津製作所 TEL 0839-74-0220				
型式・名称	Mobile Art Evolution				
定格	100kV—320mA 400mA—80kV				
使用開始年月日	平成	21 年	10 月	14 日	設置後 経過年数
					10 年
保守点検実施 予定年月日	管理年度: 令和元年度				
	第1回	令和	元	年	12 月
保守点検 年月日	第1回 令和 1 年 12 月 23 日				
	実施確認者 : _____				
保守点検計画起案者	安全管理担当者		神崎 竜二		

保守点検マニュアル

以下の項目を1回/年行うこと。

点検項目

令和 元 年12月23日

ポータブル装置(A1 スタッフステーション廊下 AMEC)

高電圧発生装置

	確認	備考
* 高圧ケーブルブッシングのゆるみ	○	
* 低圧ケーブルの破損・断裂	○	
* ケース内の異音・油漏れ・異臭	○	
* 放電音の有無	○	
* 表示計器の動作	○	
* 表示灯の点灯	○	
* 内部リレーの動作	○	
* 電気回路接続部のゆるみ	○	
* スイッチの動作確認	○	
* 異音・異臭の有無	○	

X線保持装置

	確認	備考
* 滑車の軸・ネジの損傷有無	○	
* 動作確認	○	
* 固定ノブの動作	○	
* 機械部のネジ・ナットの締め付け	○	

X線管

	確認	備考
* 管容器の油漏れの有無	○	
* 高圧ケーブルブッシングのゆるみ	○	
* 光照射野とX線照射野の表示確認	○	
* X線管基準位置の確認	○	
* 絞り羽根の動作確認	○	
* 絞り取り付け部のゆるみ	○	

移動機構

	確認	備考
* バッテリ液量確認	○	
* ブレーキ・ストッパの動作確認	○	
* キャスタの動作確認・異音の有無	○	
* スイッチの動作確認	○	