

# 保守点検計画実施記録書

山口大学医学附属病院 放射線部

放射線部医療機器  
安全管理責任者



作成年月日      2024 年      4 月      1 日

使用室名	R06撮影室		
保守点検実施状況	施設実施		
医療機器名	骨塩定量装置		
製造販売業者	Hologic社		
修理点検連絡先	東洋メディック(株) TEL 092-482-2022		
型式・名称	Horizon A		
定格	140kV—2.5mA 2.5mA—140kV		
使用開始年月日	平成    29 年    1 月    11 日	設置後 経過年数	7 年
保守点検実施 予定年月日	管理年度: 令和6年度  第1回      令和    6 年    12 月		
保守点検 実施年月日	第1回      令和    6 年    11 月    18 日 実施確認者      梅田悦子		
保守点検計画起案者	安全管理担当者	梅田悦子	

# 保守点検マニュアル

以下の項目を1回/年行うこと。

## 点検項目

令和 6 年 11 月 18 日

### 一般撮影装置(骨塩定量室 HorizonA 6番)

環境	確認	備考
* 使用中表示灯の点灯確認	—	

高電圧発生装置	確認	備考
* 高圧ケーブルプッシングのゆるみ	—	
* 低圧ケーブルの破損・断裂	—	
* ケース内の異音・油漏れ・異臭	—	
* 放電音の有無	—	
* 異音・異臭の有無	—	

制御装置	確認	備考
* パネルのランプ点灯確認	—	
* リレーのうなり・接点の荒れ	—	
* オーパロード警報表示の確認	—	
* 異音・異臭の有無	—	

X線管	確認	備考
* 高圧ケーブルプッシングのゆるみ	—	
* 光照射野とX線照射野の表示確認	—	
* X線管基準位置の確認	—	
* 絞り羽根の動作確認	—	
* 絞り取り付け部のゆるみ	—	
* 異音・異臭の有無	—	

検査台	確認	備考
* ロックの確認・振動の有無	—	
* 上下動作の動きの確認	—	
* 異音・異臭の有無	—	