

作業報告書

755-8505
 山口県宇部市 南小串1-1-1
 国立大学法人山口大学医学部附属病院 御中

弊社連絡先 カスタマーケアセンター
 電話番号 0120-041-387

Eメールアドレス
 作業番号 728201488012 / 0008
 お客様コード 1000271296
 社内参照番号 40479380

契約タイプ Advance Plan MAX

作業分類	Predetermined Maintenance (点検)	装置・ユニット名	MAGNETOM Vida
入電者		報告者	水野 由樹
電話番号		作業日時	2025/11/14 17:00:00 - 2025/11/14 21:30:00
装置ID番号	732-227851	シリアル番号	177710
御注文番号	40018177-32-0863A	技術ID番号	1000271296-MR005
作業状況	完了		

訪問理由

Preventive maintenance six monthly

使用部品・作業時間・諸経費

明細番号	品目	品名	単位	数量	請求区分
000010		時間内		4.50	

作業内容

Preventive maintenance performed; -

【訪問理由】

定期点検 年2回 第2回 (安全点検)

LHe : 525L シールド温度(50KL/50KB/CHT) : 45.8K/51.4K/34.2K

マグネット内圧 : 15.5psiA コンプレッサ動作圧 : 23bar 二次水圧(ret) : 1bar

尚、点検の詳細に関しましては後日別紙にて提出させていただきます。

シーメンスヘルスケア株式会社
 141-8644
 東京都品川区大崎1丁目11番1号
 ゲートシティ大崎ウエストタワー
 カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

作業番号	728201488012 / 0008
お客様コード	1000271296
社内参照番号	40479380

【作業内容】

点検手順書の項目に従い安全点検を実施し、システムの正常稼働を確認致しました。

- ・有資格者によるチラーの点検を実施致しました。現状の運転状態は良好との報告を受けております。
- ・ホストコンピュータの前面のホコリ流入防止フィルタを交換致しました。
- ・装置煙探知機の動作確認を実際の煙を使用し実施致しました。動作良好です。
- ・マグネット停止ボタン(ERDU)の動作テストを実施致しました。動作良好です。
- ・装置接地抵抗値の測定を実施致しました。弊社規定値を満たしております。
- ・ソフトウェアフルバックアップ (Acronis2021-System-)を外付けハードディスクに取得致しました。

点検作業後、装置の立ち上げ直し及びテストスキャンを実施して、装置の正常動作を確認致しました。

シーメンスヘルスケアの定める基本取引条件に従い、サービスを提供します。

保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

QC3

QC12

【最新】MAGNETOM VIDA

12613

水野

井上泰斗

水野 由樹

日付 2025/11/14

弊社確認

井上様

日付 2025/11/14

お客様ご確認

シーメンスヘルスケア株式会社
141-8644
東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

作業番号	728201488012 / 0008
お客様コード	1000271296
社内参照番号	40479380

作業報告書

755-8505
 山口県宇部市 南小串1-1-1
 国立大学法人山口大学医学部附属病院 御中

弊社連絡先 カスタマーケアセンター
 電話番号 0120-041-387

Eメールアドレス
 作業番号 728201488012 / 0001
 お客様コード 1000271296
 社内参照番号 40479380

契約タイプ Advance Plan MAX

作業分類	Predetermined Maintenance (点検)	装置・ユニット名	MAGNETOM Vida
入電者		報告者	浜 潤一
電話番号		作業日時	2025/11/14 17:00:00 - 2025/11/14 21:30:00
装置ID番号	732-227851	シリアル番号	177710
御注文番号	40018177-32-0863A	技術ID番号	1000271296-MR005
作業状況	完了		

訪問理由

Preventive maintenance six monthly

使用部品・作業時間・諸経費

明細番号	品目	品名	単位	数量	請求区分
000010		時間内		4.50	

作業内容

Preventive maintenance performed; -

【訪問理由】

定期点検 年2回 第2回 (安全点検)

LHe : 525L シールド温度(50KL/50KB/CHT) : 45.8K/51.4K/34.2K

マグネット内圧 : 15.5psiA コンプレッサ動作圧 : 23bar 二次水圧(ret) : 1bar

尚、点検の詳細に関しましては後日別紙にて提出させていただきます。

シーメンスヘルスケア株式会社
 141-8644
 東京都品川区大崎1丁目11番1号
 ゲートシティ大崎ウエストタワー
 カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

作業番号	728201488012 / 0001
お客様コード	1000271296
社内参照番号	40479380

【作業内容】

点検手順書の項目に従い安全点検を実施し、システムの正常稼働を確認致しました。

- ・有資格者によるチラーの点検を実施致しました。現状の運転状態は良好との報告を受けております。
- ・ホストコンピュータの前面のホコリ流入防止フィルタを交換致しました。
- ・装置煙探知機の動作確認を実際の煙を使用し実施致しました。動作良好です。
- ・マグネット停止ボタン(ERDU)の動作テストを実施致しました。動作良好です。
- ・装置接地抵抗値の測定を実施致しました。弊社規定値を満たしております。
- ・ソフトウェアフルバックアップ (Acronis2021-System-)を外付けハードディスクに取得致しました。

点検作業後、装置の立ち上げ直し及びテストスキャンを実施して、装置の正常動作を確認致しました。

シーメンスヘルスケアの定める基本取引条件に従い、サービスを提供します。

保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

【最新】MAGNETOM VIDA

7943
12613
QC3
QC2

シーメンスヘルスケア株式会社
141-8644
東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

作業番号	728201488012 / 0001
お客様コード	1000271296
社内参照番号	40479380



浜 潤一
日付 2025/11/14
弊社確認



ご担当者様
日付 2025/11/14
お客様ご確認