

作業報告書

755-8505
山口県宇部市 南小串1-1-1
国立大学法人山口大学医学部附属病院

弊社連絡先 カスタマーケアセンター
電話番号 0120-041-387

Eメールアドレス
作業番号 670000622338 / 0001
お客様コード 1000271296
社内参照番号 40479558

契約タイプ Performance Pro

作業分類	Predetermined Maintenance (点検)	装置・ユニット名	MAGNETOM Skyra
入電者		報告者	浜 潤一
電話番号		作業日時	2025/09/08 - 2025/09/08 17:00:00 22:30:00
装置ID番号	732-108696	シリアル番号	45089
御注文番号	n/a	技術ID番号	1000271296-MR003
作業状況	完了		

訪問理由

定期点検 年4回

使用部品・作業時間・諸経費

明細番号	品目	品名	単位	数量	請求区分
000010		時間内		5.50	

作業内容

Preventive maintenance performed; -

【訪問理由】

定期点検 年4回 第2回 (予防点検)

LHe : 68.6% シールド温度(50KL/50KB/CHT) : 50K/57K/35.1K

マグネット内圧 : 15.5psiA コンプレッサ動作圧 : 21bar 二次水圧(ret) : 1bar

尚、点検の詳細に関しましては後日別紙にて提出させていただきます。

シーメンスヘルスケア株式会社
141-8644
東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

作業番号	670000622338 / 0001
お客様コード	1000271296
社内参照番号	40479558

【作業内容】

点検手順書の項目に従い予防点検を実施し、システムの正常稼働を確認致しました。

- ・画像消去のご了承を頂き、データベース再構築を実施致しました。作業後、動作良好です。
 - ・有資格者によるチラーの点検を実施致しました。現状の運転状態は良好との報告を受けております。
 - ・ホストコンピュータの前面のホコリ流入防止フィルタを交換致しました。
 - ・ソフトウェアフルバックアップ (Acronis-System-) を外付けハードディスクに取得致しました。
- ※ガントリー送風機用フィルタの交換時期を過ぎております。交換をお勧め致します。

点検作業後、装置の立ち上げ直し及びテストスキャンを実施して、装置の正常動作を確認致しました。

シーメンスヘルスケアの定める基本取引条件に従い、サービスを提供します。

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

【最新】MAGNETOM SKYRA [CBDoc] M7-030.805.01.08.01

7943 [tool] 7943 Digital Multi Meter

QC3 [QC] ALL 装置附属ファントム

QC2 [QC] 力量をもつ者（自身又は有資格者）により、装置の品質担保を確認した

浜 潤一

中 村

浜 潤一

日付 2025/09/08

弊社確認

ご担当者様

日付 2025/09/08

お客様ご確認

シーメンスヘルスケア株式会社
141-8644
東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

作業番号	670000622338 / 0001
お客様コード	1000271296
社内参照番号	40479558

MAGNETOM Aera / Skyra
Maintenance Report
Preventive Maintenance

顧客 1	国立大学法人山口大学医学部附属病院
顧客 2	---
所在地	南小串1-1-1
郵便番号 市区町村	755-8505 宇部市
レポートステータス	完了
部署	---
検査室	---
パーツ番号	10432915
シリアル番号	45089
作業番号	670000622338
装置 ID 番号	1000271296-MR003
装置・ユニット名	MAGNETOM Skyra
技術 ID 番号	732-108696

システムの状態

システムは正常です。

システム操作上の影響はありませんが、システムに軽微な問題があり予防措置を行う必要があります。

システムが正常でないため、システムを使用する前に適正な措置を行う必要があります。

Siemens Healthineers

署名



日付


08.09.2025

名前

Junichi Hama

顧客担当者

署名

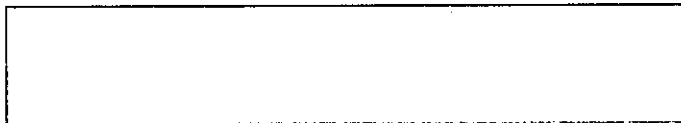

日付

08.09.2025

名前

N.A.

備考

備考

年4回 2回目

サービスプロバイダ

名前

シーメンスヘルスケア株式会社

所在地

東京都品川区大崎1丁目11番1号 ゲートシティ大崎ウエストタワー

郵便番号 市区町村

〒141-8644 東京都

略語

S

安全性

Q

品質

P

ソフトウェア

T

時刻/時間

()

スタンダード

2 メンテナンス手順

2.1 コンピュータ MRC (MRAWP) - MRSC (MRWP)

- コンピュータのクリーニング

☒ ☐ ☐

2.2 TFTモニター (Software Numaris 4)

2.2.2 点検

- TFTモニターの点検

☒ ☐ ☐

2.3 TFTモニター (Software Numaris 10)

2.3.2 点検

- TFTモニターの点検

☒ ☐ ☐

2.4 バキュームポンプ (コンフォートキット オプション)

- バキュームポンプフィルターの交換 (2年ごと)

日付

N.A.

☐ ☐ ☒

2.5 グラジエントフィルター

- グラジエントフィルターのファンの点検

☒ ☐ ☐

2.6 冷却

- 冷却システム - 一般点検

☒ ☐ ☐

2.7 SEP (オプション)

- SEPの水回路の点検

☒ ☐ ☐

2.8 マグネットシステム

2.8.1 コールドヘッド

- コールドヘッドを監視している (必要に応じてコールドヘッドを交換)
- コールドヘッドを交換している (コールドヘッドを監視しない場合は24ヵ月ごとに交換)

日付

05-Oct-2024

☒ ☐ ☐

☒ ☐ ☐

- 使用開始日

日付

05-Oct-2024

☒ ☐ ☐

- 最終交換日

日付

05-Oct-2024

☒ ☐ ☐

2.8.2 吸着器

- 吸着器の交換 (F70、3年ごと)

日付

06-Nov-2022

☒ ☐ ☐

2.9 患者テーブル

2.9.1 患者テーブルの油圧システム

- 患者テーブルの油圧システムの点検

☒ ☐ ☐

2.9.2 オプションのドッキングテーブル：ドッキングステーション

- ドッキングステーションの点検（ドッキングテーブルのみ）

☒ ☐ ☐

2.10 RF室ドア

2.10.1 ドア

- RF室ドアの点検

☒ ☐ ☐

2.11 ソフトウェア（Numaris 4）

2.11.1 ディレクトリのクリーンアップ（Numaris 4システムのみ）

- P MR保存ログファイルの削除

☒ ☐ ☐

2.11.2 施設固有のデータ

- P 施設固有のデータの保存

☒ ☐ ☐

2.12 オプション：Combi Dockable Table

2.12.1 オプションのCombi Dockable Table：油圧システム

- オプションのCombi Dockable Table：油圧システムの点検

☐ ☐ ☒

2.12.2 オプションのCombi Dockable Table：ドッキングステーション

- オプションのCombi Dockable Table：ドッキングステーションの点検

☐ ☐ ☒

2.13 モバイルシステム - メンテナンス

2.13.1 ShockLog 298

2.13.1.6 ShockLog 298データのダウンロード

- ShockLog 298データのダウンロード

☐ ☐ ☒

2.13.1.7 ShockLog 298 のバッテリーの交換

- ShockLog 298 のバッテリーの交換

☐ ☐ ☒