

保守点検計画実施記録書

山口大学医学附属病院 放射線部

放射線部医療機器
安全管理責任者



作成年月日 2024 年 4 月 1 日

保管場所	A1 スタッフステーション廊下		
保守点検実施状況	施設実施		
医療機器名	移動型エックス線装置		
製造販売業者	(株)島津製作所		
修理点検連絡先	(株)島津製作所 サポートセンター TEL 0120-524-333		
型式・名称	Mobile Art Evolution MX8		
定格	133kV—200mA 400mA—80kV		
使用開始年月日	令和 5 年 12 月 21 日	設置後 経過年数	1 年
保守点検実施 予定年月日	管理年度: 令和6年度 第1回 令和 6 年 12 月		
保守点検 実施年月日	第1回 令和 6 年 11 月 18 日 実施確認者 神崎 竜二 池原 欣希		
保守点検計画起案者	安全管理担当者	神崎 竜二	

保守点検マニュアル

以下の項目を1回／年行うこと。

点検項目

ポータブル装置 AMEC(島津 Mobile Art Evolution MX8)

令和 6 年 11 月 18 日

高電圧発生装置

	確認	備考
* 高圧ケーブルプッシングのゆるみ	○	
* 低圧ケーブルの破損・断裂	○	
* 異音・油漏れ・異臭の有無	○	
* 表示計器の動作	○	
* 表示灯の点灯	○	
* 内部リレーの動作	○	
* 電気回路接続部のゆるみ	○	
* スイッチの動作確認	○	

X線保持装置

	確認	備考
* 滑車の軸・ネジの損傷有無	○	
* 動作確認	○	
* 固定ボルトの緩みの有無	○	
* 機械部のネジ・ナットの締め付け	○	

X線管

	確認	備考
* 管容器の油漏れの有無	○	
* ケーブルの緩みや損傷の有無	○	
* 光照射野とX線照射野の表示確認	○	
* X線管基準位置の確認	○	
* 絞り羽根の動作確認	○	
* 絞り取り付け部のゆるみ	○	

移動機構

	確認	備考
* バッテリ液量確認	○	
* ブレーキ・ストップの動作確認	○	
* キャスタの動作確認・異音の有無	○	
* スイッチの動作確認	○	