


# 保守点検計画実施記録書

山口大学医学附属病院 放射線部

放射線部医療機器 安全管理責任者


作成年月日      2023 年      4 月      1 日

保管場所	A1 初療室1, 2			
保守点検実施状況	施設実施			
医療機器名	移動型エックス線装置			
製造販売業者	(株)島津製作所			
修理点検連絡先	(株)島津製作所 TEL 0839-74-0220			
型式・名称	Mobile Art Evolution			
定格	100kV—320mA 400mA—80kV			
使用開始年月日	平成	22 年	7 月	30 日
			設置後 経過年数	13 年
保守点検実施 予定年月日	管理年度: 令和5年度  第1回      令和      5 年      12 月			
保守点検 実施年月日	第1回      令和      5 年      11 月      13 日  実施確認者      加藤 玲奈			
保守点検計画起案者	安全管理担当者			神崎 竜二

# 保守点検マニュアル

以下の項目を1回/年行うこと。

## 点検項目

ポータブル装置 初療室(島津 Mobile Art Evolution)

令和 5 年 11 月 13 日

### 高電圧発生装置

	確認	備考
* 高圧ケーブルプッシングのゆるみ	✓	
* 低圧ケーブルの破損・断裂	✓	
* 異音・油漏れ・異臭の有無	✓	
* 表示計器の動作	✓	
* 表示灯の点灯	✓	
* 内部リレーの動作	✓	
* 電気回路接続部のゆるみ	✓	
* スイッチの動作確認	✓	

### X線保持装置

	確認	備考
* 滑車の軸・ネジの損傷有無	✓	
* 動作確認	✓	
* 固定ボルトの緩みの有無	✓	
* 機械部のネジ・ナットの締め付け	✓	

### X線管

	確認	備考
* 管容器の油漏れの有無	✓	
* ケーブルの緩みや損傷の有無	✓	
* 光照射野とX線照射野の表示確認	✓	
* X線管基準位置の確認	✓	
* 絞り羽根の動作確認	✓	
* 絞り取り付け部のゆるみ	✓	

### 移動機構

	確認	備考
* バッテリ液量確認	✓	
* ブレーキ・ストッパの動作確認	✓	
* キャスタの動作確認・異音の有無	✓	
* スイッチの動作確認	✓	