

保守点検計画実施記録書

山口大学医学附属病院 放射線部

放射線部医療機器
安全管理責任者



作成年月日 2023 年 4 月 1 日

使用室名	R08撮影室		
保守点検実施状況	施設実施		
医療機器名	一般撮影装置		
製造販売業者	キヤノンメディカルシステムズ(株)		
修理点検連絡先	キヤノンメディカルシステムズ(株) TEL 083-973-7611		
型式・名称	KXO-80GSS		
定格	150kV—500mA 1000mA—80kV		
使用開始年月日	平成 26 年 3 月	設置後 経過年数	9 年
保守点検実施 予定年月日	管理年度: 令和5年度 第1回 令和 5 年 12 月		
保守点検 実施年月日	第1回 令和 5 年 11 月 13 日 実施確認者 加藤 玲奈		
保守点検計画起案者	安全管理担当者	神崎 竜二	

保守点検マニュアル

以下の項目を1回/年行うこと。

点検項目

令和 5年 11月13日

一般撮影装置(第1骨部撮影室 8番)

環境	確認	備考
* 使用中表示灯の点灯確認	✓	

高電圧発生装置	確認	備考
* 高圧ケーブルプッシングのゆるみ	✓	
* 低圧ケーブルの破損・断裂	✓	
* 異音・油漏れ・異臭の有無	✓	

制御装置	確認	備考
* パネルのランプ点灯確認	✓	
* リレーのうなり・接点の荒れ	✓	
* オーパロード警報表示の確認	✓	
* 異音・異臭の有無	✓	

X線管	確認	備考
* 高圧ケーブルプッシングのゆるみ	✓	
* 光照射野とX線照射野の表示確認	✓	
* X線管基準位置の確認	✓	確認済み
* 絞り羽根の動作確認	✓	
* 絞り取り付け部のゆるみ	✓	
* 異音・異臭の有無	✓	

天井走行式X線管支持器	確認	備考
* レール取り付けナットの締め付け	✓	
* 滑車・軸受け・ネジの損傷	✓	
* 可動範囲内の動きの確認	✓	確認済み
* 電磁ロックの確認・振動の有無	✓	
* 鋼索素線の破断の有無	✓	
* 異音・異臭の有無	✓	

リーダー撮影台	確認	備考
* 固定ネジ・ナットの締め付け	✓	
* 鋼索素線の破断の有無	✓	

ブッキー撮影台	確認	備考
* 天板ロックの確認・振動の有無	✓	
* 上下動作の動きの確認	✓	
* ブッキーの動作確認	✓	
* 異音・異臭の有無	✓	