

保守点検計画実施記録書

山口大学医学附属病院 放射線部

放射線部医療機器
安全管理責任者

作成年月日 2025 年 4 月 1 日

伊東 克能

保管場所	A1 初療室1, 2		
保守点検実施状況	施設実施		
医療機器名	移動型エックス線装置		
製造販売業者	(株)島津製作所		
修理点検連絡先	(株)島津製作所 サポートセンター TEL 0120-524-333		
型式・名称	Mobile Art Evolution		
定格	100kV—320mA 400mA—80kV		
使用開始年月日	平成 22 年 7 月 30 日	設置後 経過年数	15 年
保守点検実施 予定年月日	管理年度: 令和7年度 第1回 令和 7 年 12 月		
保守点検 実施年月日	第1回 令和 8 年 1 月 31 日 実施確認者 池原 欣希		
保守点検計画起案者	安全管理担当者	梅田 悦子	

保守点検マニュアル

以下の項目を1回／年行うこと。

点検項目

ポータブル装置 初療室(島津 Mobile Art Evolution)

令和 8 年 1 月 30 日

高電圧発生装置

	確認	備考
* 高圧ケーブルプッシングのゆるみ	✓	
* 低圧ケーブルの破損・断裂	✓	
* 異音・油漏れ・異臭の有無	✓	
* 表示計器の動作	✓	
* 表示灯の点灯	✓	
* 内部リレーの動作	✓	
* 電気回路接続部のゆるみ	✓	
* スイッチの動作確認	✓	

X線保持装置

	確認	備考
* 滑車の軸・ネジの損傷有無	✓	
* 動作確認	✓	
* 固定ボルトの緩みの有無	✓	
* 機械部のネジ・ナットの締め付け	✓	

X線管

	確認	備考
* 管容器の油漏れの有無	✓	
* ケーブルの緩みや損傷の有無	✓	
* 光照射野とX線照射野の表示確認	✓	
* X線管基準位置の確認	✓	
* 絞り羽根の動作確認	✓	
* 絞り取り付け部のゆるみ	✓	

移動機構

	確認	備考
* バッテリー液量確認	✓	
* ブレーキ・ストッパの動作確認	✓	
* キャスタの動作確認・異音の有無	✓	
* スイッチの動作確認	✓	