

保守点検計画実施記録書

山口大学医学附属病院 放射線部

放射線部医療機器 安全管理責任者

作成年月日 2025 年 4 月 1 日

伊東 克能

保管場所	A1 スタッフステーション廊下				
保守点検実施状況	施設実施				
医療機器名	移動型エックス線装置				
製造販売業者	(株)島津製作所				
修理点検連絡先	(株)島津製作所 サポートセンター TEL 0120-524-333				
型式・名称	Mobile Art Evolution MX8				
定格	133kV—200mA 400mA—80kV				
使用開始年月日	令和	5 年	12 月	21 日	設置後 経過年数
					2 年
保守点検実施 予定年月日	管理年度: 令和7年度				
	第1回	令和	7 年	12 月	
保守点検 実施年月日	第1回 令和 8 年 / 月 30 日				
	実施確認者 池原 欣希				
保守点検計画起案者	安全管理担当者				梅田 悦子

保守点検マニュアル

以下の項目を1回／年行うこと。

点検項目

ポータブル装置 AMEC(島津 Mobile Art Evolution MX8)

令和 8 年 1 月 30 日

高電圧発生装置

	確認	備考
* 高圧ケーブルプッシングのゆるみ	✓	
* 低圧ケーブルの破損・断裂	✓	
* 異音・油漏れ・異臭の有無	✓	
* 表示計器の動作	✓	
* 表示灯の点灯	✓	
* 内部リレーの動作	✓	
* 電気回路接続部のゆるみ	✓	
* スイッチの動作確認	✓	

X線保持装置

	確認	備考
* 滑車の軸・ネジの損傷有無	✓	
* 動作確認	✓	
* 固定ボルトの緩みの有無	✓	
* 機械部のネジ・ナットの締め付け	✓	

X線管

	確認	備考
* 管容器の油漏れの有無	✓	
* ケーブルの緩みや損傷の有無	✓	
* 光照射野とX線照射野の表示確認	✓	
* X線管基準位置の確認	✓	
* 絞り羽根の動作確認	✓	
* 絞り取り付け部のゆるみ	✓	

移動機構

	確認	備考
* バッテリー液量確認	✓	
* ブレーキ・ストッパの動作確認	✓	
* キャスタの動作確認・異音の有無	✓	
* スイッチの動作確認	✓	