

# 解析付心電計(本体)【FCP-9900H】定期点検報告書

1/2

保守契約：有 総括、通常、無

保守契約番号(報告書管理番号)：

9374(003340)

施設名 山口大学病院(用度)様	機器名 or 一般名称 解析付心電計(本体)	点検日 2024年11月06日	点検検収日 2024年11月06日
設置場所 検査検査	型式名 or 型番 FCP-9900H	次回点検 2025年11月	ご署名 田中智子
機器管理番号(施設)	製造販売業者 フクダ電子株式会社	製造番号 50000264	購入年月日 2020年06月24日

項目番号	点検項目	判定	処理
<b>1 清浄状態、清掃</b>			
1	清浄状態確認(汚染汚濁無し、或いは措置)	◎	
2	清掃(汚れ等は事前清掃実施)	◎	
<b>2 視覚的点検(本体、ディスプレイ、付属品、トローリー)</b>			
1	本体外装(外装傷、割れ、変形、錆なし)	◎	否
2	銘板・パネル(剥がれ、汚れなし)	◎	否
3	キー(破損等なし)	◎	否
4	ディスプレイ外装(外装傷、割れ、変形等なし)	◎	否
5	液晶(傷、割れ、変形なし)	◎	否
6	電源コード/誘導コード(傷、破損等なし)	◎	否
7	E-カーリップ/胸部電極(汚れ、錆、傷、破損等なし)	◎	否
8	記録紙(装填状態に問題なし)	◎	否
9	取扱説明書/添付文書(所定位置に保管)	◎	否
10	トローリー 外装(外装傷、割れ、変形なし)	◎	否
11	トローリー ねじ・ボルト(緩みなし)	◎	否
12	トローリー ラベル(剥がれ、汚れなし)	◎	否
<b>3 機械的点検(本体、付属品)</b>			
1	キー(動作がスムーズ)	◎	否
2	記録器(動作がスムーズ、異常音なし)	◎	否
3	タッチパネル(反応スムーズ)	◎	否
4	電源コード/誘導コード(接続スムーズ、ガタなし)	◎	否
5	E-カーリップ/胸部電極(接続状態に問題なし)	◎	否
6	トローリー キャスター(確実にロックされること)	◎	否
<b>4 電気的点検</b>			
1	電源(電源投入し画面が表示されること)	◎	否
2	表示(波形表示画面に波形が表示されること)	◎	否
3	印刷(波形が印刷されること)	◎	否
4	記録速度 25mm/s(誤差2%以内)	◎	否

項目番号	点検項目	判定	処理
<b>4 電気的点検(つづき)</b>			
5	校正電圧(誤差5%以内)	◎	否
<b>5 メンテナンステスト</b>			
1	時計確認(正しい時刻が表示されていること)	◎	否 A
2	サーマル記録テスト		
	蛇行が無いこと	◎	否
	記録紙両端に耳折れが無いこと	◎	否
	記録紙、擦れ、ドット抜けが無いこと	◎	否
	搬送速度(誤差±2%以内)	◎	否
3	表示(ドット抜けなし、表示色正常)	◎	否
4	キー(押下キー正常表示)	◎	否
5	タッチパネル(タッチポイント正常反応)	◎	否
6	サウンド(ブザーが鳴ること)	◎	否
7	記録ミシン目位置(正しいこと)	◎	否
8	I/Oテスト(OKとなること)	◎	否
<b>6 ステータスチェック</b>			
1	バックアップ電池(2.5V以上)	◎	否
2	サーマルヘッド状態(室温10°C以内)	◎	否
3	マガジン状態(開けたときUP、閉じたときSET)	◎	否
4	紙あり/なしセンサ(紙入れ時あり、紙外し時なし)	◎	否
<b>7 電気的性能・特性</b>			
1	感度		
	感度×1 (9.8~10.2)	計測値	10.0 mm ◎ 否
	感度×1/2(4.75~5.25)	計測値	5.00 mm ◎ 否
	感度×1/4(2.375~2.625)	計測値	2.500 mm ◎ 否
	感度×2 (19.0~21.0)	計測値	20.0 mm ◎ 否
2	時定数(3.2~3.84秒 or 0.05Hzで70%以上のF特)		良・否 /

※ 済および良否判定結果に○を付けること(対象外の項目は斜線で閉じること)

※ 安全・機能の項目で異常が発見された場合、またはエラーメッセージ等が表示された場合、速やかに使用を中止し、フクダ電子営業員までご連絡ください

使用期間：耐用期間内 耐用期間以上

注 未納オプション機能の点検は、省略可

## 処理欄の記号説明

RP	部品交換	/	対象外・未使用	A	校正・調整	C	清掃	R	修理
----	------	---	---------	---	-------	---	----	---	----

点検の結果、次の通りご報告いたします 総合判定 <input checked="" type="checkbox"/> 異常ありません <input type="checkbox"/> 修理等対応が必要です <input type="checkbox"/> 使用を中止して、緊急に修理等が必要です [故障及び修理内容]  [その他情報]	受託会社 フクダ電子広島販売株式会社山口営業所 点検者 長沼 勝夫 受託責任者(医療機器修理責任技術者) 谷森 孝司 作業区分 <input checked="" type="checkbox"/> 出張 <input type="checkbox"/> 引取 <input type="checkbox"/> 休日 <input type="checkbox"/> 夜間
---	--

