

作業報告書

755-8505
山口県宇部市 南小串1-1-1
国立大学法人山口大学医学部附属病院

弊社連絡先 カスタマーケアセンター
電話番号 0120-041-387

Eメールアドレス
作業番号 670000630345 / 0001
お客様コード 1000271296
社内参照番号

契約タイプ

作業分類	Predetermined Maintenance (点検)	装置・ユニット名	MAGNETOM Prisma
入電者		報告者	浜 潤一
電話番号		作業日時	2025/05/12 - 2025/05/12 17:00:00 22:45:00
装置ID番号	732-189375	シリアル番号	66077
御注文番号	n/a	技術ID番号	1000271296-MR004
作業状況	完了		

訪問理由	装置動作状況	3=正常稼働
------	--------	--------

定期点検 年4回

使用部品・作業時間・諸経費

明細番号	品目	品名	単位	数量	請求区分
000010		作業時間 (h)		5.75	

作業内容

Preventive maintenance performed; -

【訪問理由/システム状況・現象等】

定期点検 年4回 第2回 (予防点検)

LHe: 74.5% シールド温度(50KL/50KB/CHT): 49.3K/55.6K/40.2K

マグネット内圧: 15.5psiA コンプレッサ動作圧: 22bar 二次水圧(ret): 1bar

尚、点検の詳細に関しましては後日別紙にて提出させていただきます。

シーメンスヘルスケア株式会社
141-8644
東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

作業番号	670000630345 / 0001
お客様コード	1000271296
社内参照番号	

【作業内容/推定・特定した原因】

点検手順書の項目に従い予防点検を実施し、システムの正常稼働を確認致しました。

- ・画像消去のご了承を頂き、データベース再構築を実施致しました。作業後、動作良好です。
- ・ホストコンピュータの前面のホコリ流入防止フィルタを交換致しました。

点検作業後、装置の立ち上げ直し及びテストスキャンを実施して、装置の正常動作を確認致しました。

シーメンスヘルスケアの定める基本取引条件に従い、サービスを提供します。

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

【最新】PRISMA / PRISMA FIT [CBDoc] M7-040.805.01.04.01

浜

都倉

浜 潤一

日付 2025/05/12

弊社確認

ご担当者様

日付 2025/05/12

お客様ご確認

シーメンスヘルスケア株式会社
141-8644
東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387

MAGNETOM Prisma / Prisma fit
Maintenance Report
Preventive Maintenance

顧客 1	国立大学法人山口大学医学部附属病院
顧客 2	---
所在地	南小串1-1-1
郵便番号 市区町村	755-8505 宇部市
レポートステータス	完了
部署	---
検査室	---
パーツ番号	10849582
シリアル番号	66077
作業番号	670000630345
装置 ID 番号	1000271296-MR004
装置・ユニット名	MAGNETOM Prisma
技術 ID 番号	732-189375

システムの状態

システムは正常です。

システム操作上の影響はありませんが、システムに軽微な問題があり予防措置を行う必要があります。

システムが正常でないため、システムを使用する前に適正な措置を行う必要があります。

Siemens Healthineers
署名



日付	12.05.2025
名前	Hama Junichi

顧客担当者
署名

--

日付	12.05.2025
名前	N.A.

備考

備考

--

サービスプロバイダ

名前

シーメンスヘルスケア株式会社

所在地

東京都品川区大崎1丁目11番1号 ゲートシティ大崎ウエストタ
ワー

郵便番号 市区町村

〒141-8644 東京都

略語

S

安全性

Q

品質

P

ソフトウェア

T

時刻/時間

(-)

スタンダード

2 メンテナンス手順

2.1 コンピュータ MRC (MRAWP) - MRSC (MRWP)

- コンピュータのクリーニング

☒ ☐ ☐

2.2 TFTモニター (Software Numaris 4)

2.2.2 点検

- TFTモニターの点検

☒ ☐ ☐

2.3 TFTモニター (Software Numaris 10)

2.3.2 点検

- TFTモニターの点検

☒ ☐ ☐

2.4 バキュームポンプ (コンフォートキット オプション)

- バキュームポンプフィルターの交換 (2年ごと)

日付

☐ ☐ ☒

2.5 グラジエントフィルター

- グラジエントフィルターのファンの点検

☒ ☐ ☐

2.6 冷却

- 冷却システム - 一般点検

☒ ☐ ☐

2.7 SEP (オプション)

- SEPの水回路の点検

☒ ☐ ☐

2.8 マグネットシステム

2.8.1 コールドヘッド OR64

2.8.1.1 コールドヘッド

- コールドヘッドの点検

☒ ☐ ☐

2.8.2 コールドヘッド OR65

- コールドヘッドがモニタリングされている (必要に応じてコールドヘッドを交換)

☒ ☐ ☐

- コールドヘッドの交換 (コールドヘッドがモニタリングされていない場合は24ヵ月ごとに交換)

日付

02-Dec-2023

☒ ☐ ☐

2.8.3 吸着器

- 吸着器の交換 (F70、3年ごと)

日付

02-Dec-2023

☒ ☐ ☐

2.9 患者テーブル

2.9.1 患者テーブルの油圧システム

- 患者テーブルの油圧システムの点検

☒ ☐ ☐

2.9.2 オプションのドッキングテーブル：ドッキングステーション

- ドッキングステーションの点検（ドッキングテーブルのみ）

☒ ☐ ☐

2.10 RF室ドア

2.10.1 ドア

- RF室ドアの点検

☒ ☐ ☐

2.11 ソフトウェア（Numaris 4ソフトウェア）

2.11.1 ディレクトリのクリーンアップ（Numaris 4システムのみ）

- P MR保存ログファイルの削除

☒ ☐ ☐

2.11.2 施設固有のデータ

- P 施設固有のデータの保存

☒ ☐ ☐