

保守契約：☒有 [☐総括、☒通常]、☐無

保守契約番号(報告書管理番号)：

10436(005780)

施設名 山口大学病院 様		機器名 or 一般名称 解析付心電計(本体)	点検日 2025年11月20日	点検検収日 2025年11月20日
設置場所		型式名 or 型番 FCP-9900H	次回点検 2026年11月	ご署名 森口
機器管理番号(施設) A-5	製造販売業者 フクダ電子株式会社	製造番号 50000590	購入年月日 2023年09月22日	

項目 番号	点検項目	判定	処理
1	清掃状態、清掃		
1	清掃状態確認(汚染汚濁無し、或いは措置)	○	
2	清掃(汚れ等は事前清掃実施)	○	
2	視覚的点検(本体、ディスプレイ、付属品、トrolley)		
1	本体外装(外装傷、割れ、変形、錆なし)	○	否
2	銘板・パネル(剥がれ、汚れなし)	○	否
3	キー(破損等なし)	○	否
4	ディスプレイ外装(外装傷、割れ、変形等なし)	○	否
5	液晶(傷、割れ、変形なし)	○	否
6	電源コード/誘導コード(傷、破損等なし)	○	否
7	E-カークリップ/胸部電極(汚れ、錆、傷、破損等なし)	○	否
8	記録紙(装填状態に問題なし)	○	否
9	取扱説明書/添付文書(所定位置に保管)	○	否
10	トrolley 外装(外装傷、割れ、変形なし)	○	否
11	トrolley ねじ・ボルト(緩みなし)	○	否
12	トrolley ラベル(剥がれ、汚れなし)	○	否
3	機械的点検(本体、付属品)		
1	キー(動作がスムーズ)	○	否
2	記録器(動作がスムーズ、異常音なし)	○	否
3	タッチパネル(反応スムーズ)	○	否
4	電源コード/誘導コード(接続スムーズ、ガタなし)	○	否
5	E-カークリップ/胸部電極(接続状態に問題なし)	○	否
6	トrolley キャスター(確実にロックされること)	○	否
4	電気的点検		
1	電源(電源投入し画面が表示されること)	○	否
2	表示(波形表示画面に波形が表示されること)	○	否
3	印刷(波形が印刷されること)	○	否
4	記録速度 25mm/s(誤差2%以内)	○	否

項目 番号	点検項目	判定	処理
4	電気的点検（つづき）		
5	校正電圧（誤差5%以内）	(良)・否	
5	メンテナンステスト		
1	時計確認(正しい時刻が表示されていること)	(良)・否	
2	サーマル記録スト		
	蛇行が無いこと	(良)・否	
	記録紙両端に耳折れが無いこと	(良)・否	
	記録ムラ、擦れ、ドット抜けが無いこと	(良)・否	
	搬送速度(誤差±2%以内)	(良)・否	
3	表示(ドット抜けなし、表示色正常)	(良)・否	
4	キー(押下キー正常表示)	(良)・否	
5	タッチパネル(タッチポイント正常反応)	(良)・否	
6	サウンド「ブザー」が鳴ること	(良)・否	
7	記録ミシン目位置(正しいこと)	(良)・否	
8	I/Oテスト(OKとなること)	(良)・否	
6	ステータスチェック		
1	バックアップ電池(2.5V以上)	(良)・否	
2	サーマルヘッド状態(室温10℃以内)	(良)・否	
3	マガジン状態(開けたときUP、閉じたときSET)	(良)・否	
4	紙あり／なしセンサ(紙入時 あり、紙外し時 なし)	(良)・否	
7	電気的性能・特性		
1	感度		
	感度×1 (9.8～10.2)	計測値 10.0 mm	(良)・否
	感度×1/2:(4.75～5.25)	計測値 5.00 mm	(良)・否
	感度×1/4:(2.375～2.625)	計測値 2.500 mm	(良)・否
	感度×2 (19.0～21.0)	計測値 20.0 mm	(良)・否
2	時定数(3.2～3.84秒 or 0.05Hzで70%以上のF特)	良・否	/

次ページへ続く

※ 済および良否判定結果に○を付けること（対象外の項目は斜線で閉じること）

※ 安全・機能の項目で異常が発見された場合、またはエラーメッセージ等が表示された場合、速やかに使用を中止し、フクダ電子営業員までご連絡ください

使用期間：☒耐用期間内 ☐耐用期間以上

注 未納オプション機能の点検は、省略可

処理欄の記号説明									
RP	部品交換	/	対象外・未使用	A	校正・調整	C	清掃	R	修理
点検の結果、次の通りご報告いたします [交換部品]									
総合判定 ☒ 異常ありません ☐ 修理等対応が必要です ☐ 使用を中止して、緊急に修理等が必要です									
[故障及び修理内容]									
[その他情報]									
受託会社 フクダ電子広島販売株式会社山口営業所									
点検者 長沼 勝矢									
受託責任者(医療機器修理責任技術者) 谷森 孝司									
作業区分 ☒ 出張 ☐ 引取 ☐ 休日 ☐ 夜間									

2/2

50000590

[illegible]

注 未納オプション機能の点検は、省略可



**FUKUDA
DENSO**