

血圧脈波検査装置【VSM-2500A】定期点検報告書

1/3

保守契約：☒有 ☐総括、☒通常、☐無

保守契約番号(報告書管理番号)：

10436(005782)

施設名 山口大学病院 様	機器名 or 一般名称 血圧脈波検査装置	点検日 2025年11月20日	点検検収日 2025年11月20日
設置場所 検査室	型式名 or 型番 VSM-2500A	次回点検	ご署名 森口
機器管理番号(施設) A-8	製造販売業者 フクダ電子株式会社	製造番号 50001074	購入年月日 2023年09月22日

項目番号	点検項目	判定	処理
1	清掃・消毒		
1	消毒必要性確認(汚染されていないこと)	○	
2	清掃の実施(清掃が終了していること)	○	
2	外観・操作動作・付属品類点検 注) 傷、汚れ等は安全および機能上問題ないことを判定基準とする		
1	本体外装(外装傷、割れ、変形、錆がないこと)	○	否
2	銘板・パネル(はがれ、汚れがないこと)	○	否
3	キー(破損がないこと)	○	否
4	エーカクリップ、胸部電極(傷、割れ、変形等ないこと)	○	否
5	カフ、センサ類、誘導コード(傷、破損がないこと)	○	否
6	電源コード、各接続ケーブル(傷、破損がないこと)	○	否
7	取扱説明書・添付文書(所定の場所に保管)	○	否
3	動作		
1	電源(電源投入で画面表示のこと)	○	否
2	表示(異常、チラツキ、エラー無)	○	否
3	アイコン表示(接続機器が正常表示)	○	否
4	キー(動作がスムーズであること)	○	否
5	0mmHg確認(電源投入時の圧力値が±1mmHg以内)	○	否
6	時計(現在時刻表示)	○	否
4	メンテナンスモード点検		
1	バックアップ電池(2.5V以上)	○	否
2	タッチパネルテスト(タッチポイントが正しく反応すること)	○	否
3	表示テスト(すべてのドットが表示、正しい色が表示)	○	否
4	キーテスト(タッチしたボタンのシンボルが反転すること)	○	否
5	サウンドテスト(タッチしたボタンの音が鳴ること、音量変化)	○	否
6	サマル記録テスト		
	記録紙搬送に蛇行がないこと	○	否
	記録紙両面で耳折れがないこと	○	否
	記録ムラ、擦れ、ドット抜けがないこと	○	否
	記録速度(±3%以内)	○	否

項目番号	点検項目	判定	処理
5	本体血圧		
1	零点確認(0±1mmHg以内)		
	R-B	計測値 0.0 mmHg	○ 否
	L-B	計測値 0.0 mmHg	○ 否
	R-A	計測値 0.0 mmHg	○ 否
	L-A	計測値 0.0 mmHg	○ 否
2	圧力精度		
	圧力精度 50mmHg(±3mmHg以内)		
	R-B	計測値 50.0 mmHg	○ 否
	L-B	計測値 50.0 mmHg	○ 否
	R-A	計測値 49.0 mmHg	○ 否
	L-A	計測値 49.0 mmHg	○ 否
	圧力精度 100mmHg(±3mmHg以内)		
	R-B	計測値 99.0 mmHg	○ 否
	L-B	計測値 99.0 mmHg	○ 否
	R-A	計測値 100.0 mmHg	○ 否
	L-A	計測値 100.0 mmHg	○ 否
	圧力精度 150mmHg(±3mmHg以内)		
	R-B	計測値 149.0 mmHg	○ 否
	L-B	計測値 149.0 mmHg	○ 否
	R-A	計測値 149.0 mmHg	○ 否
	L-A	計測値 150.0 mmHg	○ 否
	圧力精度 200mmHg(±3mmHg以内)		
	R-B	計測値 199.0 mmHg	○ 否
	L-B	計測値 199.0 mmHg	○ 否
	R-A	計測値 199.0 mmHg	○ 否
	L-A	計測値 199.0 mmHg	○ 否
	次ページへ続く		

※ 済および良否判定結果に○を付けること(対象外の項目は斜線で閉じること)

※ 安全・機能の項目で異常が発見された場合、またはエラーメッセージ等が表示された場合、速やかに使用を中止し、フクダ電子営業員までご連絡ください

使用期間：☒耐用期間内 ☐耐用期間以上

注 未納オプション機能の点検は、省略可

処理欄の記号説明

RP	部品交換	/	対象外・未使用	A	校正・調整	C	清掃	R	修理	
----	------	---	---------	---	-------	---	----	---	----	--

点検の結果、次の通りご報告いたします

[交換部品]

総合判定

- ☒ 異常ありません
☐ 修理等対応が必要です
☐ 使用を中止して、緊急に修理等が必要です

[故障及び修理内容]

[その他情報]

受託会社

フクダ電子広島販売株式会社山口営業所

点検者

谷森 孝司

受託責任者(医療機器修理責任技術者)

谷森 孝司

作業区分

- ☒ 出張 ☐ 引取
☐ 休日 ☐ 夜間



血圧脈波検査装置【VSM-2500A】定期点検報告書

2/3

機器名 : 血圧脈波検査装置 製造番号 : 50001074

項目番号	点検項目	判定	処理
5	本体血圧 (つづき)		
	圧力精度 250mmHg (±3mmHg以内)		
	R-B 計測値 249.0 mmHg	○ 否	
	L-B 計測値 249.0 mmHg	○ 否	
	R-A 計測値 249.0 mmHg	○ 否	
	L-A 計測値 249.0 mmHg	○ 否	
	圧力精度 300mmHg (±3mmHg以内)		
	R-B 計測値 300.0 mmHg	○ 否	
	L-B 計測値 299.0 mmHg	○ 否	
	R-A 計測値 299.0 mmHg	○ 否	
	L-A 計測値 300.0 mmHg	○ 否	
3	圧上限 (320±10mmHg以内)		
	R-B	○ 否	
	L-B	○ 否	
	R-A	○ 否	
	L-A	○ 否	
4	加圧時間 (13秒以下)		
	R-B	○ 否	
	L-B	○ 否	
	R-A	○ 否	
	L-A	○ 否	
5	空気漏れ (4mmHg/min以下)		
	R-B	○ 否	
	L-B	○ 否	
	R-A	○ 否	
	L-A	○ 否	
6	排気特性1 (5秒以下)		
	R-B	○ 否	
	L-B	○ 否	
	R-A	○ 否	
	L-A	○ 否	
7	排気特性2 (5秒以下)		
	R-B	○ 否	
	L-B	○ 否	
	R-A	○ 否	
	L-A	○ 否	
8	減圧特性 (5±2mmHg/s)		
	R-B	○ 否	
	L-B	○ 否	
	R-A	○ 否	
	L-A	○ 否	
9	時間制限 (170±10秒, 高速時8±1秒)		
	R-B	○ 否	
	L-B	○ 否	
	R-A	○ 否	
	L-A	○ 否	

項目番号	点検項目	判定	処理
6	足趾ユニット血圧		
1	零点確認 (0±1mmHg以内)		
	右足趾 計測値 mmHg	良・否	／
	左足趾 計測値 mmHg	良・否	／
2	圧力精度		
	圧力精度 50mmHg (±3mmHg以内)		
	右足趾 計測値 mmHg	良・否	／
	左足趾 計測値 mmHg	良・否	／
	圧力精度 100mmHg (±3mmHg以内)		
	右足趾 計測値 mmHg	良・否	／
	左足趾 計測値 mmHg	良・否	／
	圧力精度 150mmHg (±3mmHg以内)		
	右足趾 計測値 mmHg	良・否	／
	左足趾 計測値 mmHg	良・否	／
	圧力精度 200mmHg (±3mmHg以内)		
	右足趾 計測値 mmHg	良・否	／
	左足趾 計測値 mmHg	良・否	／
	圧力精度 250mmHg (±3mmHg以内)		
	右足趾 計測値 mmHg	良・否	／
	左足趾 計測値 mmHg	良・否	／
	圧力精度 300mmHg (±3mmHg以内)		
	右足趾 計測値 mmHg	良・否	／
	左足趾 計測値 mmHg	良・否	／
3	圧上限 (320±10mmHg以内)	良・否	／
	右足趾	良・否	／
	左足趾	良・否	／
4	加圧時間 (20秒以下)	良・否	／
	右足趾	良・否	／
	左足趾	良・否	／
5	空気漏れ (4mmHg/min以下)	良・否	／
	右足趾	良・否	／
	左足趾	良・否	／
6	排気特性1 (5秒以下)	良・否	／
	右足趾	良・否	／
	左足趾	良・否	／
7	排気特性2 (5秒以下)	良・否	／
	右足趾	良・否	／
	左足趾	良・否	／
8	減圧特性 (5±2mmHg/s)	良・否	／
	右足趾	良・否	／
	左足趾	良・否	／
9	時間制限 (130±10秒, 高速時8±1秒)	良・否	／
	右足趾	良・否	／
	左足趾	良・否	／
次ページへ続く			

※ 済および良否判定結果に○を付けること (対象外の項目は斜線で閉じること)

※ 安全・機能の項目で異常が発見された場合、またはエラーメッセージ等が表示された場合、速やかに使用を中止し、フクダ電子営業員までご連絡ください。

注 未納オプション機能の点検は、省略可

処理欄の記号説明

RP	部品交換	／	対象外・未使用	A	校正・調整	C	清掃	R	修理		
----	------	---	---------	---	-------	---	----	---	----	--	--



3/3

機器名 :

血圧脈波検査装置

製造番号：

50001074

[illegible]

注、未納オプション機能の点検は、省略可

処理欄の記号説明

