



顧客情報

お客様: 国立大学法人山口大学 医学部附属病院 様
契約番号: MS2156-20230407-035

装置情報

システムID: OH0127 Serial No.: --
製品名: OPTIMA 660 PRO MID HN P20
Asset tag #: -- Room Location: CT室

ケース

ケース番号: 08943695 ケースタイプ: Planned Maintenance

Work Order Details

WO Owner: Koie Nobuhiro WO Number: WO-10639022 WO Type: Field Service
Tube/Slice Count: 409720
現象: 定期点検 (スケジュールA)
作業内容: 実施いたしました。詳細は別紙定期整備をご参照願います。
管球スライス = 409720秒です。
動作確認: 整備記録の内容に基づく動作確認を行い、問題のないことを確認致しました。

作業

Owner	タイプ	開始日時	終了日時	時間
Koie Nobuhiro	Planned Maintenance	2023 Sep 20 13:00	2023 Sep 20 18:00	05:00

パーツ

表示する項目がありません

作業担当者:

お客様サイン:

鯉三

廣永 歩帆

作業者名:

お客様:

Nobuhiro Koie

日時:

日時:

20 Sep 2023 19:16

20 Sep 2023 19:24

本作業に契約時間を超える作業が含まれる場合は作業員からの説明をご確認の上、ご署名をお願いいたします

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。

今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。

なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、

ご了承下さるようあわせてお願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120-055-919

Company Information:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

認定保守代理店

日信電子サービス株式会社



点検レポート：スケジュール

顧客情報

お客様名

国立大学法人山口大学 医学部附属病院 御中

サービス記録#：

08943695

システム番号/シリアル番号

OH0127

システムタイプ：

Optima CT660

お客様機器名称：

ソフトウェアバージョン：

15HW25.2_SP2-0-1

点検周期：

5か月

開始日

2023-09-20

国

JAPAN-JA

モダリティ

CT

準備項目 - 前回点検の確認:

前回実施の点検

スケジュールC

前回点検日：

2023-09-20

事前に完了している項目を記載

事前実施項目なし

点検スケジュール システム A

点検開始時の項目

温湿度の確認

項目	温度	湿度	結果	コメント
撮影室の温湿度 (合格/不合格/非該当から選択)	25	46	合格	

ガントリーの点検

項目	結果	コメント
----	----	------

ガントリーディスプレイライトの確認
(合格/不合格/非該当から選択)

合格 ▼

各緊急停止ボタンの動作確認
(合格/不合格/非該当から選択)

合格 ▼

患者チルトセンサーの確認
(合格/不合格/非該当から選択)

合格 ▼

ファントムの点検

項目	結果	コメント
QAファントムの点検 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 ▼	<input type="text"/>

ガントリー電源オフ（カバーなし）

通常点検

項目	結果	コメント
緊急電源遮断スイッチ（壁付） (合格/不合格/非該当から選択)	非該当 ▼	設置していないため非該当
UPS パワーオフの動作確認 (合格/不合格/非該当から選択)	非該当 ▼	設置していないため非該当
ガントリーカバーケーブルの点検 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 ▼	<input type="text"/>

コンソールの清掃と点検

項目	結果	コメント
コンポーネントフィルター、ファン、グリルの清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 ▼	<input type="text"/>
ファンの目視点検 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 ▼	<input type="text"/>

耐震アンカーの確認（必要な場合）
(合格/不合格/非該当から選択)

非該当

▼

アンカー固定していないため非該当

スリップリングとブラシブロックの確認と点検

項目	結果	コメント
スリップリングの清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 ▼	
スリップリングトラックの点検 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 ▼	
ブラシブロックの清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 ▼	
ブラシチップの確認 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 ▼	

ガントリーフィルターの清掃

項目	結果	コメント
DASディテクタープレナムフィルターの清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 ▼	
ディテクターフェースプレートの清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 ▼	
ガントリーヒーターフィルターの清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 ▼	
トップカバーファンの清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 ▼	
ガントリー回転で干渉無きことを確認 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 ▼	

高電圧ケーブルのキャンドルスティック点検

項目	検査結果	コメント
----	------	------

高電圧ケーブルのキャンドルスティック
の点検

合格 v

(合格/不合格/非該当から選択)

ガントリー電源オン（カバーなし）

通常点検

項目	結果	コメント
UPSの電源が入り操作可能であること (合格/不合格/非該当から選択)	非該当 v	設置していないため非該当
プレナムファンの動作確認（5か所） (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	
プレナムファン(3)の動作確認 Merc40 (合格/不合格/非該当から選択)	非該当 v	HARO DASのため非該当

項目	前回注油からの回転数	結果	コメント
ガントリーメインベアリング の注油 (完了/未完了/非該当から選択)	1176406	非該当 v	総回転数：8678333 前回：75 01927 必要回転未達非該当

X線管ヒートエクスチェンジャーとポンプの点検

項目	結果	コメント
X線管ヒートエクスチェンジャーの点検 と清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 v	
JEDIインバータファンの点検と清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 v	

ガントリー電源オン（カバーあり）

通常点検

項目	結果	コメント
スキャンウィンドウの確認/交換 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 v	

ガントリーローテーションのクリアランス確認

合格 v

(完了/未完了/非該当から選択)

テーブルの清掃と点検 (GT1700V と VT2000)

項目	結果	コメント
テーブルパンの点検と清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 v	
テーブルアンカーの点検 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 v	
ドライブベルトの点検 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 v	
ローラーの清掃 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 v	
テーブルレールの注油 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 v	
テーブル脚部ベアリングの注油 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 v	
ベアリングリテーナの点検 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	
フラットテーブルトップマウントの点検 (合格/不合格/非該当から選択)	非該当 v	フラットテーブル無しのため非該当
テーブルカバーの点検 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	
クレードルアクセサリーの取付け確認 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	
テープスイッチの確認 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	

システムスキャンテスト

項目	QA ファントムシリアル番号	保管場所	ガントリー シリアルNo.
	1006144	ドキュメントロッカー上	48334YC7

スキャン	スキャンエラーの有無	アーチファクト	コメント
シリーズ 1 (スカウト/オートボイス) (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	いいえ v	
シリーズ 2 (アキシシャル/チルト) (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	いいえ v	
シリーズ 3 (ヘリカル/オートボイス) (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	いいえ v	

項目	結果	コメント
X線照射表示灯 (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	
スキャンコントロールボタンのテスト (合格/不合格/非該当から選択)	合格 v	

完了処理

項目	結果	コメント
サイトログの更新 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 v	
点検記録の文書作成 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 v	
お客様記録の作成 (完了/未完了/非該当から選択)	合格 v	

点検スケジュール システム B

点検スケジュール システム C

点検スケジュール システム W

オプションHHSスキャンデータ

追加作業の有無

継続作業の必要なし

作業予定日:

2023-09-20

この点検は、GE
Healthcare の点検規格の
すべてに合格しました。



コメント・ツール・添付ファイル

コメント 文字 2000

使用ツール

ツール詳細

トルクレンチ 中村製作
所/N12QLK

シリアル番号

18020823

バーコード

NA

校正期限日

2024-03-31

ツール詳細

DVM FLUKE/87V

シリアル番号

45240085

バーコード

NA

校正期限日

2024-07-31

添付ファイル

ファイル選択 選択されていません

Attached Documents :

GE 担当者

作業者数

1

名前:

鯉江 伸広

SSO # :

500300981

サービス記録#

08943695

完了日

2023-09-20

お客様署名

Yes Not Required

Document Number: BBGCH0418 **Revision:** 2