

血圧脈波検査装置【VS-2500システム】 定期点検報告書

1/2

保守契約： 有 総括、 通常、 無

報告書管理番号：

施設名 山口大学病院 様	機器名 or 一般の名称 血圧脈波検査装置	点検日 2023年 11月 29日	点検検取日 年 月 日
設置場所 検査室	型式名 or 型番 VS-2500システム	次回点検 年 月	ご署名
機器管理番号(施設)	製造販売業者名 フクダ電子(株)	製造番号 50001074	購入年月日 2023年 9月 22日

項目番号	点検項目	判定	処理
1 清掃・消毒			
01	消毒必要性確認 (汚染されていないこと)	○	
02	清掃の実施 (清掃が終了していること)	○	
2 外観・操作動作・付属品類点検 注) 傷、汚れ等は安全および機能上問題ないことを判定基準とする			
01	本体外装 (外装傷、割れ、変形、錆がないこと)	○	
02	銘板・パネル (はがれ、汚れがないこと)	○	
03	キー (破損がないこと)	○	
04	エーカクリップ、胸部電極 (傷、割れ、変形等ないこと)	○	
05	カフ、センサ類、誘導コード (傷、破損がないこと)	○	
06	電源コード、各接続ケーブル (傷、破損がないこと)	○	
07	取扱説明書、添付文書 (所定の場所に保管)	○	
3 動作			
01	電源 (電源投入で画面表示のこと)	○	
02	表示 (異常、チラツキ、エラーがないこと)	○	
03	アイコン表示 (接続機器が正常表示)	○	
04	キー (動作がスムーズであること)	○	
05	0mmHg確認 (電源投入時の圧力値が±1mmHg以内)	○	
06	時計 (現在時刻表示)	○	
4 メンテナンスモード点検			
01	バックアップ電池 (2.5V以上であること)	○	
02	タッチパネルテスト (タッチポイントが正しく反応すること)	○	
03	表示テスト (すべてのドットが表示、正しい色が表示)	○	
04	キーテスト (タッチしたボタンのシンボルが反転すること)	○	
05	サウンドテスト (タッチしたボタンの音が鳴ること、音量変化)	○	
06	サーマル記録テスト		
	記録紙搬送に蛇行がないこと	○	
	記録紙両面で耳折れがないこと	○	
	記録ムラ、擦れ、ドット抜けがないこと	○	
	記録速度(±3%以内)	○	

項目番号	点検項目	判定			
		R-B	L-B	R-A	L-A
5 本体血圧					
01	零点確認 (0±1mmHg以内)	○	○	○	○
02	圧力精度 50mmHg(±3mmHg以内)	○	○	○	○
		○	○	○	○
		○	○	○	○
		○	○	○	○
03	圧上限 (320±10mmHg以内)	○	○	○	○
04	加圧時間 (13秒以下)	○	○	○	○
05	空気漏れ (4mmHg/min以下)	○	○	○	○
06	排気特性1 (5秒以下)	○	○	○	○
07	排気特性2 (5秒以下)	○	○	○	○
08	減圧特性 (5±2mmHg/s)	○	○	○	○
09	時間制限 (170±10秒、高速時8±1秒)	○	○	○	○
6 足趾ユニット血圧(BPU-700)					
		右足趾	左足趾		
01	零点確認 (0±1mmHg以内)	○	○		
02	圧力精度 50mmHg(±3mmHg以内)	○	○		
		○	○		
		○	○		
		○	○		
03	圧上限 (320±10mmHg以内)	○	○		
04	加圧時間 (20秒以下)	○	○		
05	空気漏れ (4mmHg/min以下)	○	○		
06	排気特性1 (5秒以下)	○	○		
07	排気特性2 (5秒以下)	○	○		
08	減圧特性 (5±2mmHg/s)	○	○		
09	時間制限 (130±10秒、高速時8±1秒)	○	○		

※ 済および良否判定結果に○を付けること (対象外の項目は斜線で閉じること)

使用期間： 耐用期間内 耐用期間以上

※ 安全・機能の項目で異常が発見された場合、またはエラーメッセージ等が表示された場合、速やかに使用を中止し、フクダ電子営業員までご連絡ください

処理欄の記号説明 ※ 処理欄には、下に説明している記号を記載すること

RP	部品交換	/	対象外・未使用	A	校正・調整	C	清掃	R	修理
----	------	---	---------	---	-------	---	----	---	----

点検の結果、次の通りご報告いたします 総合判定 <input checked="" type="checkbox"/> 異常ありません <input type="checkbox"/> 修理等対応が必要です <input type="checkbox"/> 使用を中止して、緊急に修理等が必要です [故障及び修理内容、その他情報]	【交換部品】	受託会社 フクダ電子広島販売株式会社 山口営業所 点検者 谷森 孝司 受託責任者(医療機器修理責任技術者) 谷森 孝司 作業区分 <input checked="" type="checkbox"/> 出張 <input type="checkbox"/> 引取 <input type="checkbox"/> 休日 <input type="checkbox"/> 夜間
--	--------	--

